


MANUAL DE LIMPIEZA EN 3 PASOS

Tras realizar una limpieza previa en el punto de utilización, transporte los instrumentos con seguridad al área de procesamiento designada y clasifíquelos antes de empezar la limpieza.

01

REMOJE LOS INSTRUMENTOS

1. Llene la cubeta o el fregadero con detergente y agua caliente (siga las instrucciones del fabricante).
2. Asegúrese de que todos los instrumentos están en posición desbloqueada/abierta.
3. Sumerja los instrumentos en una solución limpiadora hasta que la materia orgánica se disuelva, no más de 5 minutos.
4. Cepille los instrumentos bajo el agua.
5. Elimine todos los restos de la superficie del instrumento.
6. Revise atentamente cada instrumento antes de pasarlo a la zona de lavado.

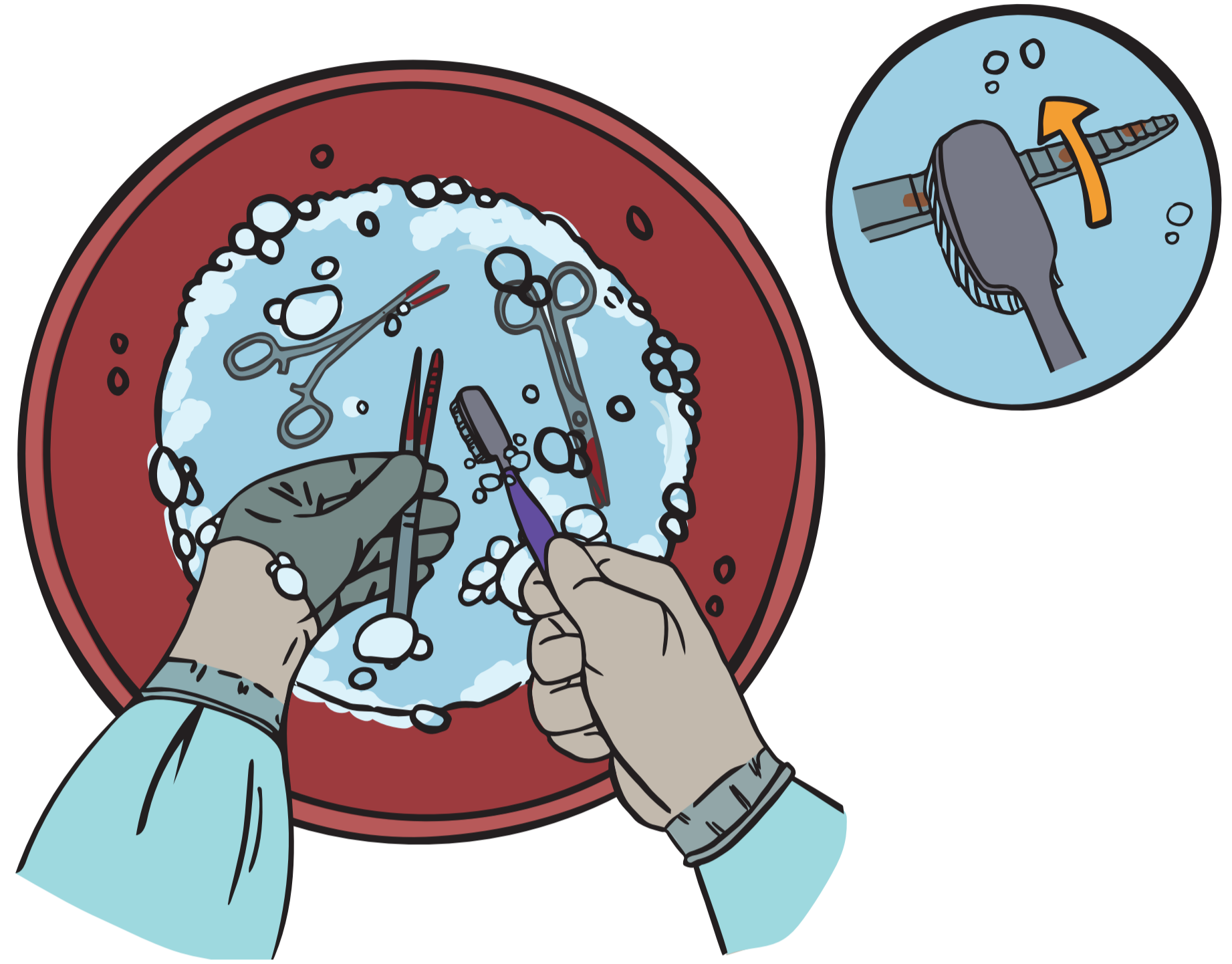

02

LAVE LOS INSTRUMENTOS


1. Llene la cubeta o el fregadero con detergente y agua caliente (siga las instrucciones del fabricante).
2. Use una jeringa o un cepillo para limpiar todos los instrumentos con huecos.
3. Elimine todos los restos visibles de óxido o manchas.
4. Inspeccione con atención todas las superficies serradas, los cierres, los dientes, etc. y cerciórese de que están limpias antes de moverlos a la cubeta de enjuague.



03

ENJUAGUE LOS INSTRUMENTOS

1. Llene la cubeta/fregadero con agua limpia (lo ideal es agua blanda, destilada o desionizada).
2. Utilice un cepillo limpio (no el mismo que usó para los pasos 1 y 2) para eliminar los restos de la solución limpiadora de la superficie del instrumental.
3. Inspeccione con atención cada instrumento una vez más para comprobar que está totalmente limpio.

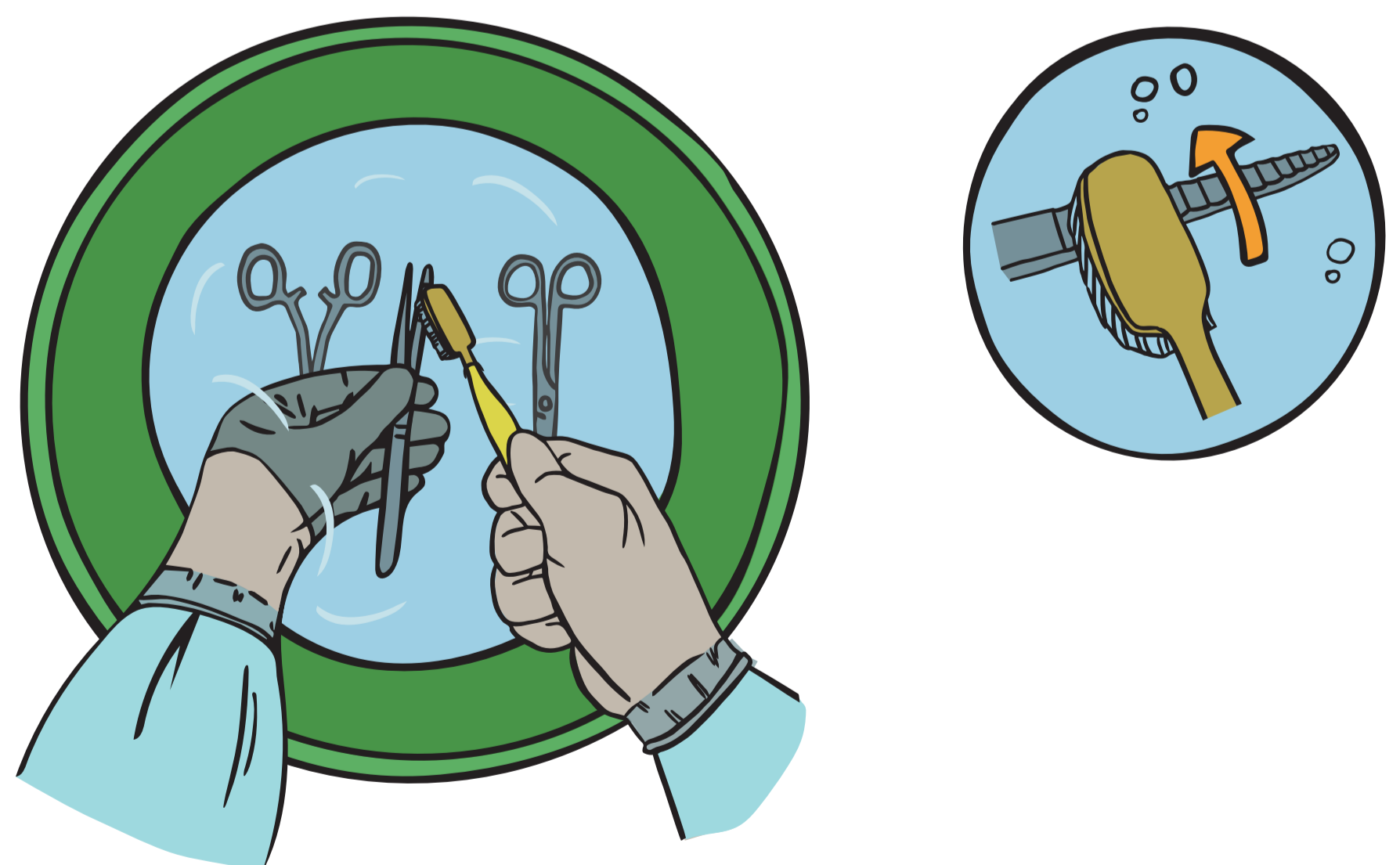

Tras una limpieza y enjuague en profundidad, aleje el instrumental de la zona sucia y dispóngalo en una superficie limpia para su secado, inspección y guardado.