


# TÉCNICAS DE GUARDADO ASÉPTICO PARA ESTERILIZACIÓN POR FAVOR


Todo el material guardado se debe inspeccionar con atención antes de su uso para garantizar que no hay agujeros, roturas, cinta ni partículas en el material.

## DOBLADO EN SOBRE

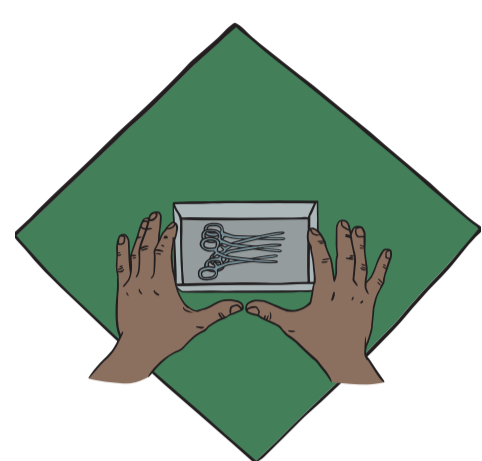


01

Coloque el objeto en la mitad de un único papel de embalaje con forma de diamante.

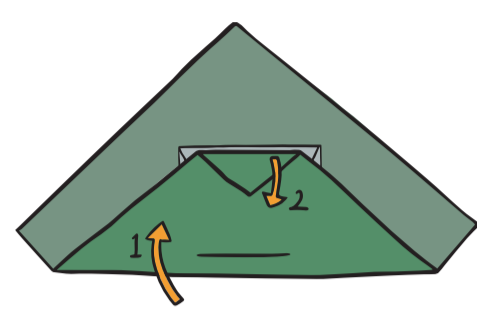


02

Sujete la punta inferior y tire hasta cubrir el contenido; después doble la punta para formar una pestaña para tirar.

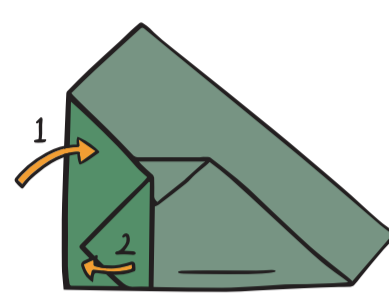


03

Doble la esquina izquierda sobre el contenido y doble la punta para formar una pestaña también.

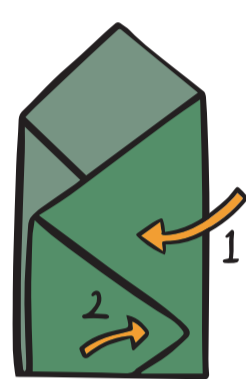


04

Doble la esquina derecha sobre el pliegue izquierdo y doble la punta hacia atrás para formar otra pestaña.

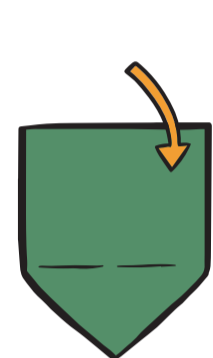


05

Tire de la punta superior hasta cubrir el contenido.

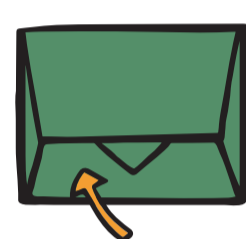


06

Pliegue la esquina bajo los pliegues derecho e izquierdo, dejando visible una pestaña de 2,5 cm.

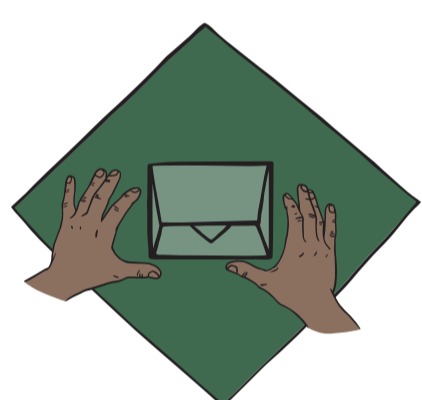


07

Coloque el objeto embalado en la mitad de otro único papel de embalaje con forma de diamante.

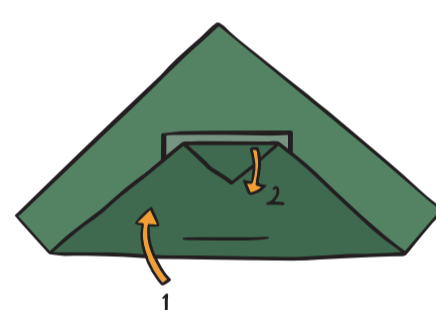


08

Sujete la punta inferior y tire hasta cubrir el contenido; después doble la punta para formar una pestaña para tirar.

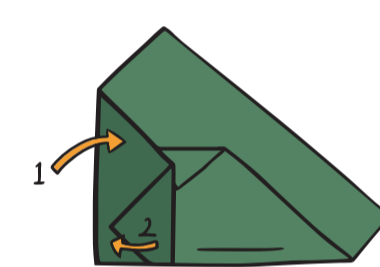


09

Doble la esquina izquierda sobre el contenido y doble la punta para formar una pestaña.

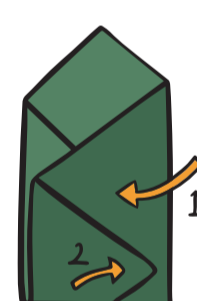


10

Doble la esquina derecha sobre el pliegue izquierdo y doble la punta hacia atrás para formar otra pestaña.

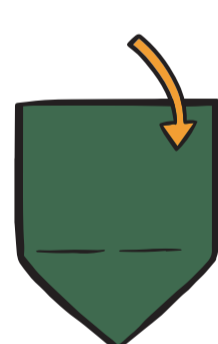

11

Tire de la punta superior hasta cubrir el contenido.

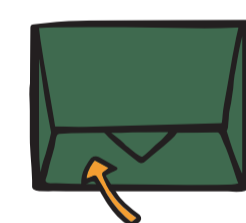

12


Pliegue la esquina bajo los pliegues derecho e izquierdo, dejando visible una pestaña de 2,5 cm.



13


Asegure el paquete con una cinta con indicador químico.

## DOBLADO EN CUADRADO

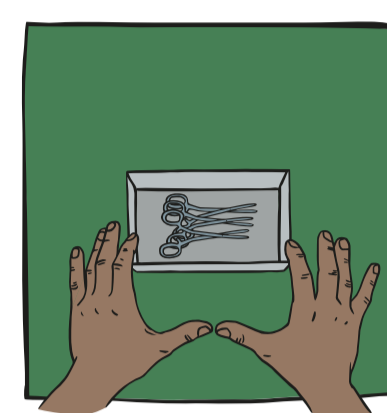


01

Coloque el objeto en la mitad de un único pliego de embalaje cuadrado.

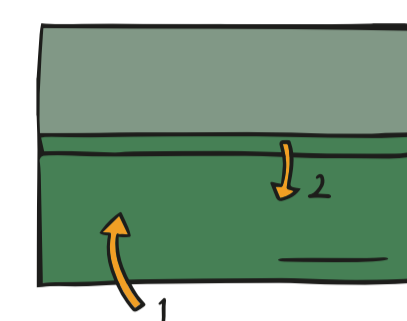


02

Doble el tercio inferior hasta cubrir el contenido; después doble el borde para formar una pestaña alargada.

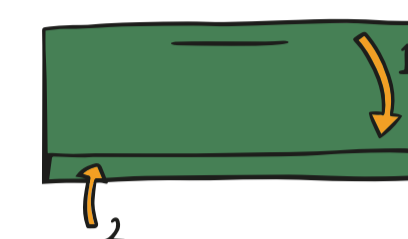


03

Doble el tercio superior hasta cubrir el contenido; después doble el borde para formar una pestaña.

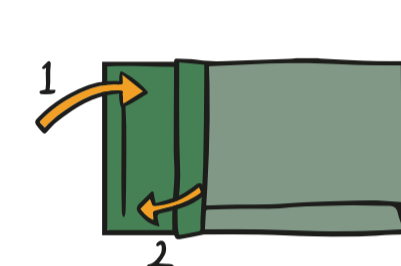


04

Doble el tercio izquierdo por encima del pliegue superior y doble el borde para formar una pestaña.

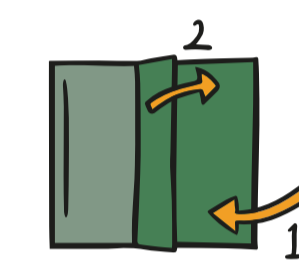


05

Doble el tercio derecho sobre el medio y doble el borde para formar una pestaña.

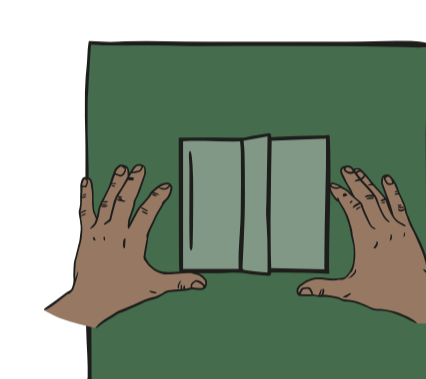


06

Coloque el objeto embalado en la mitad de un único pliego de embalaje cuadrado.

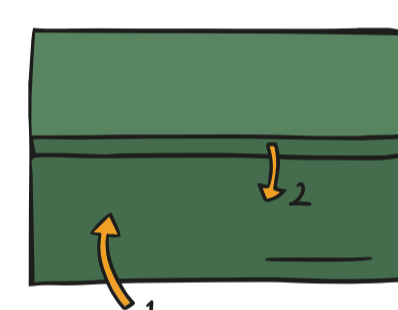


07

Doble el tercio inferior hacia arriba hasta cubrir el contenido; después doble el borde para formar una pestaña.

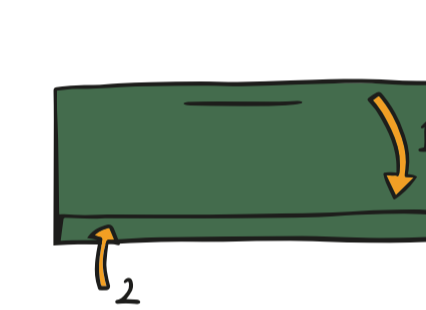


08

Doble el tercio superior hasta cubrir el contenido; después doble el borde para formar una pestaña.

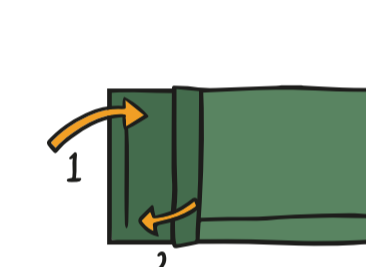


09

Doble el tercio izquierdo por encima del pliegue superior y doble el borde para formar una pestaña.

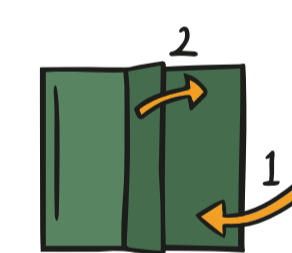

10

Doble la esquina izquierda sobre el contenido y doble la punta para formar una pestaña.

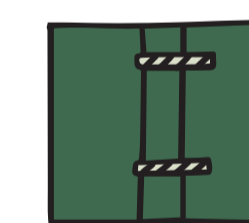

11

Asegure el paquete con una cinta con indicador químico.

Con embalaje secuencial se hace referencia a un paquete que se embala una vez en una unidad de un material y después se vuelve a embalar en otra unidad del material, creando un paquete dentro de un paquete.

También puede utilizar embalaje simultáneo siguiendo los mismos pasos pero embalando el paquete solo una vez con dos hojas de material.