

请退回下列物品：



一个或多个药剂翻转装置




药剂控制装置Dose PERS

如需关闭：


1. 拔下电源线



2. 拧开并卸下盖子

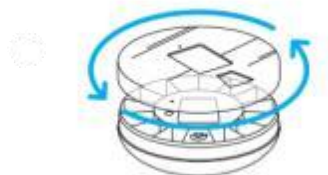

3. 按住按钮 按住屏幕左侧底部的黑色按钮3到4秒钟，直至屏幕关闭

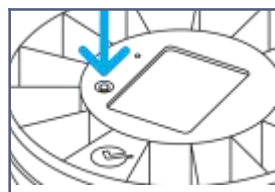

如需关闭：

1. 如果您退回Dose PERS，设备将自动关闭。您所要做的就是把它放入退货包装袋或退货包装盒中！

感谢您使用Dose Health！

如果您有任何问题，请致电联系我们 [844-300-6212](tel:844-300-6212)

退货说明:

1. 拔下设备并关机
- 有关如何关闭设备的说明, 请参阅此卡背面



2. 寻找 在此包装盒里找到带有USPS标签的子/信封



3. 所有物品放入 预付的USPS信封中, 包括所有收费材料。
如果原始设备包装盒不适合, 请不要将其包括在内。关于您需要退货的设备, 请参阅背面。



4. 可在任何USPS站点寄送
或者请在您的信箱挂上小旗

