

# TRACOE silcosoft<sup>®</sup>

## Reinigung

- 1** Unter lauwarmen, fließendem Wasser für mindestens 3 Minuten spülen.
- 2** Bei Verkrustungen für ca. 30 Minuten in bis zu 65 Grad Celsius heißem Wasser einweichen und Spülvorgang (s.o.) wiederholen und danach an der Luft trocknen lassen.
- 3** Bei Bedarf kann eine Desinfektion in kochendem Wasser für mindestens 3 Minuten erfolgen (Homecare).
- 4** Die Kanülen sind autoklavierbar (Dampf-Druck-Sterilisation).
- 5** Ein-Patienten-Produkt  
Nutzungsdauer 29 Tage. Reinigung bis zu 7 mal.

**Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!**

