

TRACOE Produktinformation

TRACOE care - Gleitgel REF 677



Das von TRACOE vertriebene Gleitgel für den medizinischen Gebrauch erleichtert die schonende und hygienische Platzierung von Tracheostomiekanülen. Es ist, als Einmalprodukt, steril verpackt und mit nur 2,7 g pro Einzelverpackung perfekt dosiert.

Vor dem Einsetzen der Trachealkanüle wird eine dünne Schicht des Gleitgels auf den unteren Bereich der Kanüle aufgetragen. Die Einzeldosen in Sachets sind praktisch und einfach anzuwenden. Es wird dadurch einem übermäßiges Benetzen vorgebeugt.

Das Gleitgel besteht aus Glycerin, PEG, 4-Hydroxybenzoesäureester, Natriumhydroxid und gereinigtem Wasser. Es ist farb- und geruchlos, fettfrei, wasserlöslich und klebt nicht.

Geöffnete oder defekte Verpackungen sollten verworfen werden.

Bestellinformationen

REF Nummer	VE	Beschreibung	PZN Nummer	HIMI Nummer
REF 677	30 St.	TRACOE Gleitgel, Sachets a 2,7 g	04349308	12.99.99.1002



Für weitere Informationen: www.tracoe.com

