

Produktinformation

REF 104



REF 104



TRACOE *comfort* Tracheostomiekannüle mit Sprechfunktion

- Inklusive:
- ◆ Innenkannüle, gefenstert, mit schwenkbarem Sprechventil Typ B
 - ◆ Innenkannüle mit Sockel
 - ◆ Kannülenband


Für tracheotomierte Patienten mit erhaltenem oder teilweise erhaltenem Kehlkopf zum Sprechen.

Hilfsmittel-Nr.: 12.24.03.1001

Technische Daten

REF 101, REF 102, REF 102-D, REF 103, REF 103-O, REF 103-A, REF 103-A-O, REF 104, REF 104-O, REF 104-A, REF 104-A-O, REF 105, REF 105-D, REF 107, REF 108

REF 114 und REF 115 *in den Größen 07 – 11*

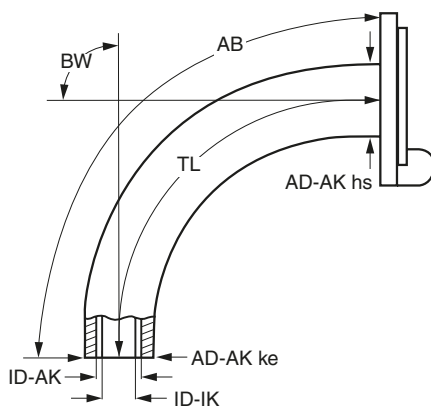

Größe	ID-AK	AD-AK ke	AD-AK hs	ID-IK	TL	AB	BW
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°
03	3,5	4,8	6,4	2,6	42	46	90°
04	4,0	5,6	7,3	3,2	50	55	90°
05	5,0	6,7	8,7	4,0	52	57	90°
06	6,0	7,6	10,0	4,8	54	60	90°
07	7,0	8,8	10,5	5,8	57	65	90°
08	8,0	10,0	11,3	6,8	61	70	90°
09	9,0	11,4	12,6	7,6	65	75	90°
10	10,0	12,4	13,7	8,7	74	85	90°
11	11,0	13,1	15,0	9,7	76	87	90°
12	12,0	14,2	16,2	10,8	78	90	90°
13	13,0	15,4	17,2	11,8	87	100	90°
14	14,0	16,6	18,2	12,6	91	105	90°

Kannülen der Größen 03, 04, 13 und 14 werden auf Bestellung produziert. Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.

ID-AK: Innendurchmesser (Lumen) der Außenkannüle am unteren Ende; **AD-AK ke:** Außendurchmesser der Außenkannüle am unteren Ende; **AD-AK hs:** Außendurchmesser der Außenkannüle hinter dem Schild; **ID-IK:** Innendurchmesser der Innenkannüle am unteren Ende; **TL:** Länge über den Mittelbogen vom Kannülenschild bis zum unteren Kannülenende; **AB:** Länge über den Außenbogen (größte Länge); **BW:** Biegewinkel

Die Bestellnummer besteht aus der **REF + Größe**, z. B. **REF 103-08**

Produktinformation

REF 104



◆ TRACOE *comfort* Sprechventil Typ B

Bei TRACOE *comfort* Kanülen mit Sprechventil Typ B ist der Ventilträger schwenkbar. Dies ermöglicht den freien Zugang zum Innenlumen der Kanüle, z. B. für die Absaugung von trachealem Sekret. Ein Stopper blockiert das Öffnen der Klappe sobald das Ventil zur Seite geschwenkt wird. Dadurch ist sie vor einem unabsichtlichen Verbiegen geschützt.

Lieferumfang der TRACOE *comfort* Kanülen



Alle TRACOE *comfort* Kanülen werden mit einem breiten, längenverstellbaren Kanülenband sowie einem Produktpass mit zwei abziehbaren Produktetiketten geliefert.

HILFSMITTEL UND REINIGUNGSARTIKEL

- ◆ TRACOE *care* Paraffinöl REF 902
Hält die Innenkanüle gleitfähig, sorgt für eine optimale Passung und gute Sprechqualität.
- ◆ TRACOE *tube clean* Reinigungsset REF 930-A/-B
mit Reinigungspulver REF 932
- ◆ TRACOE *tube clean* Reinigungsset REF 931-A/-B
mit Reinigungskonzentrat REF 933

PRODUKTVARIANTEN

Produktvarianten können bei Bedarf nach Maß gefertigt werden, um auch bei komplizierten anatomischen und physiologischen Gegebenheiten beste Funktionalität und optimalen Tragekomfort zu bieten. Das entsprechende Bestellformular finden Sie auf unserer Webseite unter www.tracoe.com/downloads.