

Produktinformation

REF 730-5



REF 730-5

TRACOE smart Cuffmanager

- Verpackungseinheit: ♦ 5 Stück
♦ einzeln steril verpackt


Der TRACOE smart Cuffmanager überwacht und reguliert den Innendruck in Niederdruckcuffs (High Volume Low Pressure Cuffs) von Tracheostomiekannülen und Endotrachealtuben.

Der Druck wird zwischen 20 und 30 cmH₂O gehalten. Bei der visuellen Kontrolle des TRACOE smart signalisiert der Aufblasdurchmesser (2/3 – 3/4) des blauen Pufferballons den empfohlenen Cuffdruck. Eine zusätzliche Prüfung kann jederzeit mit einem Cuffdruckmesser (z. B. TRACOE cpm REF 720) durchgeführt werden. Bei zu geringem Druck füllt der TRACOE smart den Cuff sehr schnell nach.

Eine integrierte Dämpfungsfunktion verhindert, dass sofort Luft vom Cuff zum Pufferballon wegströmt, wie z. B. bei Hustenstößen. Dadurch bleibt der Self-Sealing-Effekt des Cuffs während der Beatmung erhalten. Die stabile Umhüllung des TRACOE smart schützt und verhindert eine unerwünschte Kompression des hochelastischen Pufferballons.

TRACOE smart ist ein latex- und DEHP-freies Einpatientenprodukt mit einer Nutzungsdauer von 29 Tagen.

Hilfsmittelnummer: 12.24.11.0001

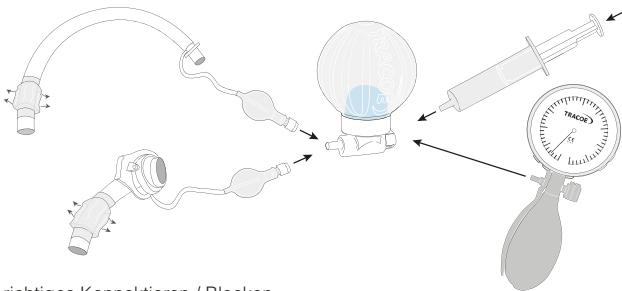

richtiges Konnektieren / Blocken

VERBINDUNGSSCHLAUCH

Folgender Verbindungsschlauch kann für den TRACOE smart Cuffmanager separat bestellt werden:

- ♦ TRACOE *technic* Verbindungsschlauch REF 702
1 m Länge mit Rückschlagventil