

## Cánulas de traqueostomía TRACOE (Cánula(s) externa(s) e interna(s)) con polvo de limpieza

La cánula de traqueostomía son productos de uso en un solo paciente y tienen una duración de la utilización de 29 días como máximo. Para la correcta limpieza se pueden utilizar nuestros productos de limpieza, polvo (REF 932) o líquido concentrado enzimático (REF 933).

- El polvo es un producto de limpieza altamente eficaz (tiempo de exposición 10 – 15 minutos).
- El líquido de limpieza concentrado es un limpiador enzimático altamente eficaz, con efecto bacteriostático y de acción rápida (tiempo de exposición máx. 1 minuto).

Dependiendo de la norma de la clínica o del centro de cuidados, la(s) cánula(s) externa(s) e

interna(s) se limpian o sustituyen según sea necesario; sin embargo, la(s) cánula(s) interna(s) al menos una vez al día.

Solo se puede colocar cada vez una cánula junto a la otra en el cedazo, es decir, una cánula externa y la(s) cánula(s) interna(s) correspondiente(s), para evitar confusiones posteriormente en la colocación.

Se recomienda utilizar el bote de limpieza con cedazo, los instrumentos usados, así como la solución limpiadora preparada solo para la(s) **cánula(s) de un paciente.**

**Tenga en cuenta las instrucciones de uso correspondientes.**

### Juego de limpieza TRACOE tube clean – REF 930

#### Componentes del juego:

- Polvo de limpieza
- Bote de limpieza con cedazo
- 1 escobilla limpiadora
- 50 bastoncillos limpiadores pequeños
- 50 bastoncillos limpiadores grandes

**REF 930-A**

**REF 930-B**



**Todos los artículos se pueden adquirir por separado.**

Más información en [www.tracoe.com/products/care](http://www.tracoe.com/products/care) o en el **catálogo de productos.**

Encontrará vídeos con consejos de cuidado y limpieza en [www.tracoe.com/en/media-library](http://www.tracoe.com/en/media-library)



## LIMPIEZA CON POLVO

- 1** Mezclar bien una cuchara dosificadora (aprox. 5 g) de polvo y 500 ml de agua destilada / agua potable en el bote de limpieza. **El tiempo de empleo útil máximo de la solución es de 24 h.**




- 2** Enjuagar la cánula externa o la(s) cánula(s) interna(s) con agua destilada / agua potable y, en caso necesario, limpiar con un bastoncillo limpiador o con una escobilla limpiadora. Los bastoncillos limpiadores son materiales de un solo uso y se eliminan después del uso.

- 3** A continuación, colocar las cánulas una junto a otra en el cedazo y sumergirlas en la solución limpiadora. **El tiempo de exposición es de 10 a 15 minutos como máximo.**



**¡ATENCIÓN!** El balón piloto no se puede sumergir en la solución limpiadora.

- 4** Extraer el cedazo del bote después del tiempo de exposición. Eliminar los posibles sedimentos restantes en las cánulas con un bastoncillo limpiador.

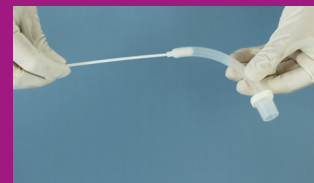

- 5** A continuación, enjuagar bien la(s) cánula(s) externa(s) e interna(s) con agua destilada / agua potable y secar con un paño sin pelusas.

- 6** Secar la cánula de traqueostomía y conservarla protegida de la luz y la suciedad. Para el almacenamiento, llenar un poco el balón. Se debe prestar especial atención para que no se forme ninguna cámara de humedad durante el almacenamiento.

- 7** Comprobar siempre la integridad de la cánula antes de volver a colocarla. Verificar además la estanqueidad de las cánulas con balón.

**¡IMPORTANTE!** No dejar nunca las cánulas durante horas o por la noche en la solución limpiadora.