

# Produktinformation

## REF 331



REF 331



**TRACOE experc Set *twist plus***  
inklusive **REF 312-P**

mit Niederdruckcuff, Doppelfensterung und minimal-traumatischem Einführsystem

Das System für *twist plus* besteht aus zwei Teilen: dem weißen Führungskatheter mit Silikonschirm und der grünen Einführhilfe. Mit Hilfe des Silikonschirms wird der Kalibersprung zwischen Kanülenende und Einführhilfe ausgeglichen.

Die *twist plus* Kanüle wird mit vormontiertem, minimal-traumatischem Einführsystem bei bereits liegender Innenkanüle geliefert. Die Einführsysteme stabilisieren und begünstigen die Führung der Kanüle. Sie zeichnen sich durch eine auf die Kanüle abgestimmte Passung und einen Anschlag am 15 mm-Konnektor aus. Nach der Platzierung der Kanüle in der Luftröhre werden die grüne Einführhilfe, der weiße Führungskatheter mit dem Silikonschirm und der Seldingerdraht als Einheit gefasst und zusammen entfernt. Dabei klappt der Silikonschirm um und das Entfernen der Einheit ist möglich.

### Die Vorteile

Die Dilatation erfolgt nach der einstufigen Ciaglia-Technik. Die minimal-traumatische Einführhilfe gleicht den Kalibersprung zwischen Kanülenende und Einführhilfe aus. Damit wird das Verletzungsrisiko bei der Platzierung der Kanüle in der Trachea minimiert. Durch den Anschlag wird eine zu weite Einführung der Einführhilfe in die Kanüle verhindert, was ebenfalls das Verletzungsrisiko reduziert. Die separat lieferbaren P-Kanülen können auch für die Rekanülierung und/oder den Kanülenwechsel, ggf. in Kombination mit dem Seldingerdraht, verwendet werden.

### experc Sets *twist plus*

Die TRACOE *twist plus* P-Kanülen REF 311-P, REF 312-P, REF 316-P und REF 888-316-P sowie das TRACOE experc Dilatations-Set REF 520 sind auch separat erhältlich.

Details zu Kanüle finden Sie in den zugehörigen Produktinformationen.

### Zubehör

#### Ersatz-Innenkanülen

- ◆ TRACOE *twist plus* Innenkanüle REF 521, ungefenstert, VE 3 Stück, einzeln steril verpackt
- ◆ TRACOE *twist plus* Innenkanüle REF 521-X Großpackung, ungefenstert, VE 10 Stück, einzeln steril verpackt
- ◆ TRACOE *twist plus* Innenkanüle REF 521-XXX Großpackung, ungefenstert, VE 30 Stück, einzeln steril verpackt
- ◆ TRACOE *twist plus* Innenkanüle REF 523, gefenstert, VE 3 Stück, einzeln steril verpackt
- ◆ TRACOE *twist plus* Innenkanüle REF 523-X Großpackung, gefenstert, VE 10 Stück, einzeln steril verpackt

#### Feuchtigkeits- und Wärmetauscher

- ◆ TRACOE humid assist I REF 640-CT
- ◆ TRACOE humid assist III REF 641
- ◆ TRACOE humid assist VI REF 642

#### Für das Cuffdruckmanagement

- ◆ TRACOE smart Cuffmanager REF 730-5
- ◆ TRACOE cuff pressure monitor (cpm) REF 720
- ◆ TRACOE cuff pressure monitor sensitive (cpms) REF 721