

# Produktinformation

## REF 958 und 959



### TRACOE purofoam Trachealkompressen mit gezacktem Schlitz

#### REF 958 groß

- Maße: ♦ ca. 9 x 10 x 0,5 cm  
 Verpackungseinheit: ♦ 10 Stück  
 ♦ einzeln steril verpackt  
 Für Tracheostomiekanülen der Größen 06 – 12.


#### REF 959 klein

- Maße: ♦ ca. 6,5 x 6,5 x 0,5 cm  
 Verpackungseinheit: ♦ 10 Stück  
 ♦ einzeln steril verpackt  
 Für Tracheostomiekanülen der Größen 03 – 05.

Hilfsmittel-Nr.: 12.99.99.1001



### Besonderheiten der TRACOE purofoam Trachealkompressen REF 958 und REF 959:

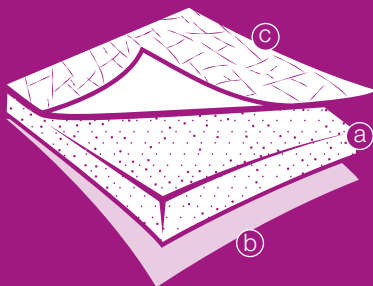

Die TRACOE purofoam Trachealkompressen bestehen aus einem absorbierenden offenporigen Polyurethanschaum (a).

Die hautseitige Oberflächenschicht der Komresse ermöglicht die Aufnahme von Flüssigkeit in den Schaumkern (b). Eine netzartige Struktur stabilisiert die purofoam Kompressen und vermindert somit die Verformung bei starker Sekretion nach der Feuchtigkeitsaufnahme.

Auf der Außenseite ist der Schaumstoff mit einer beige Beschichtung versehen, die den Übertritt von Sekreten nach außen verhindert und bakterielle Kontamination reduziert (c).

Die kreisförmige Öffnung und der gezackte Schlitz ermöglichen einen Kompressenwechsel auch bei liegender Kanüle. Die TRACOE purofoam Trachealkompressen sind zur Wundversorgung frischer bzw. gereizter Tracheostomata ebenso wie für die Abdeckung abgeheilter, jedoch nässender Tracheostomata geeignet. Die Kompressen entsprechen den modernen Prinzipien der feuchten Wundbehandlung.