

NURSICARE®

Nursicare's unike egenskaper

RENSER

- Stimulerer aktivt sårtilhelingen
- Skånsom debridering
- Såret renses kontinuerlig og behovet for å rengjøre såret reduseres

ABSORBERER

- Kraftfull superabsorbent trekker det døde vevet fra såret og opp i bandasjen
- Superabsorbenten i bandasjen trekker sårveske til såret, sårveske inneholder vekstfaktorer og næringsstoffer som er viktige i sårtilhelingsprosessen.

REDUSERER SMERTE OG INFLAMMASJON

- Mindre smerte i såret
- Reduserer inflammasjon i og rundt såret
- Minsker risiko for infeksjon

ENKEL Å BRUKE

- Enkel prosedyre
- Enkelt og raskt sårskift
- Dekker alle reglene for fuktighetsbevarende sårbehandling



AKTIV SÅRTILHELING

PolyMem er en unik multifunksjonell bandasje designet for å optimere og aktivt stimulere sårtilhelingsprosessen. Alle PolyMem bandasjene inneholder **Glycerin, Surfactant og Superabsorbent** som sammen effektivt renser, fyller, absorberer og gir en jevn fuktighet til såret under hele sårtilhelingsprosessen.

- PolyMem bandasjen tar opp sårveske, ekspanderer og fyller skånsomt sårsengen
- Sårvesken frigjør Glycerin og Surfactant fra bandasjen til sårsengen samtidig som superabsorbenten binder sårvesken i bandasjen
- Glycerin og Surfactant aktiveres; gir optimal fukt, renser sårsengen og støtter den autolytiske revisjonen og minsker behovet for smertefull manuell debridering
- Den semipermeable filmen fungerer som væskebarriere og bidrar til en ideell MVTR (Moisture Transmission Rate)






1 Bruk Nursicare direkte på brystvorten under BHen, som holder den på plass. Den mønstrede siden vendes bort fra brystvorten



2 Rengjør brystet med brystmelk eller vann før amming eller bruk av brystpumpe.

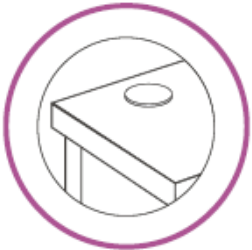

3 Om bandasjen skal brukes igjen etter amming; legg den mønstrede siden ned på et rent underlag mens du ammer. Legg deretter tilbake på brystvorten



4 Når bandasjen er gjennomfuktet kastes den. Nursicare kan **IKKE** vaskes.

Viktig å vite:

Den sårrensende effekten kan gi økt sekresjon i startfasen av behandlingen, noe som er helt normalt. Sekresjonen vil gradvis avta og såret vil vise fremgang.

Bestillingsinformasjon:

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antall pr. pakke
400-NO	Nursicare	ø6 cm	6 stk