

# PolyMem® SILVER

Inneholder Nanokrystallisk sølv og gir en effektiv antibakteriell effekt  
Sølv et i PolyMem er bundet til membranen; lekker ikke ut til vevet

- Frigis ikke til såret
- Gir ingen allergiske reaksjoner eller missfarginger på huden
- Bindes ikke i kroppens organer og belaster derfor ikke nyrer og lever

De Nanokrystalliske Sølv partiklene består av helt rent sølv med PPM 2000 (vekt sølv /vekt bandasje), 124 mg/ cm<sup>2</sup> Standard, 207 mg/cm<sup>2</sup> Max, 186mg/cm<sup>2</sup> Wic

I tillegg inneholder PolyMem Silver de samme aktive komponenter som man finner i standard PolyMem; Glycerin, Surfactant F-68 och Superabsorbent.

Denne unike formelen gir effektiv og rask opprensing av såret, holder det fuktig, fremmer autolytisk debridering og gir en effektiv sårtilheling.

## POLYMEM SILVER

Verkningsmekanism:

- Bandasjen legges på såret
- Fuktigheten fra såret aktiverer aktive komponenter i bandasjen, Sølv, Surfactant, Glycerin og Superabsorbent
- Surfactant og Glycerin frigis til sårområdet og starter opp rensingen av såret
- Superabsorbent og Sølv frigis ikke fra bandasjen og slippes ikke ut i vevet
- Superabsorbenten trekker sårvesken inn i bandasjen
- Sølv et håndterer bakterier og sopp i sårvesken inne i bandasjen.

Anvendes til flere typer sår;

Trykksår, Diabetes sår, Venøse sår

Arterielle sår, Donor og transplantat, Dermatologiske problemer, Overflatesår,



PolyMem Silver er CE -merket

EC Directive 93/42/EEC Annex II, Article 3

Avfall:

Avfall behandles i henhold til lokale prosedyrer og retningslinjer.

PolyMem Silver behandler effektivt følgende organismer :

**PolyMem Silver dressings inhibited growth of these organisms under the dressing:**

Name	ATCC #
Pseudomonas aeruginosa	9027
Staphylococcus aureus	6538

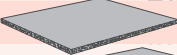

**PolyMem Silver dressings killed 99.9% of these organisms:**

Name	ATCC #
Pseudomonas aeruginosa	9027
Staphylococcus aureus	6538
Candida albicans	10231

**PolyMem Silver dressings killed 99.9% of these organisms:**

Name	ATCC #
Klebsiella pneumoniae	4352
Pseudomonas aeruginosa	9027
Staphylococcus aureus	6538
Staphylococcus aureus (MRSA)	33591
Enterococcus faecalis (VRE)	51575

## PolyMem Bestillingsinformasjon

	Artnr	Produktbeskrivelse	Størrelse	Antall
<b>Silver uten heftfilm</b>				
	1022	Silver Bandasje uten heftfilm	4,7cm x 4,7cm	20 st/tp 5fp/levfp
	1044	Silver Bandasje uten heftfilm	10,8cm x 10,8cm	15 st/tp 2 fp/levfp
	1077	Silver Bandasje uten heftfilm	17cm x 19cm	15 st/tp 1 fp/levfp
	1124	Silver Bandasje uten heftfilm	10,8cm x 32cm	12 st/tp 1 fp/levfp
<b>MAX Silver uten heftfilm</b>				
	1045	MAX Silver uten heftfilm	10cm X 10cm	8 st/tp 2 fp/levfp
	1088	MAX Silver uten heftfilm	20cm x 20cm	5 st/tp 2 fp/levfp
<b>WIC Silver for kaviteter</b>				
	1331	WIC Silver for kaviteter	2,5cm x 7,6cm	14 st/tp, 5 fp/levfp
	1333	WIC Silver for kaviteter	8cm x 8cm	10 st/tp 2 fp/levfp
	1814	WIC Silver Rope	1cm x 35cm	6 st/tp 2 fp/levfp
<b>Silver Cloth med heftfilm</b>				
	1766	Silver Cloth med heftfilm	15cm x 15cm Adhesive 9cm x 9cm Pad	15 st/tp 2 fp/levfp
	1709	Silver Sacral med heftfilm	18,4cm x 20cm Adhesive 11,4cm x 12 cm Pad	10 st/tp 2fp/levfp
	1886	Silver bandasje med heftfilm	16,5cm x 20,9cm Adhesive 10,1cm x 14,6cm Pad	10 st/tp 2 fp/levfp
	1853	Silver bandasje med heftfilm	12,7cm x 8,8cm Adhesive 7,6cm x 5cm Pad	15 st/tp 2 fp/levfp
	1823	Silver bandasje med heftfilm	5cm x 7,6cm Adhesive 2,5cm x 5cm Pad	20 st/tp 5 fp/levfp
<b>Silver uten heftfilm på rull</b>				
	1244	Silver uten heftfilm på rull	10 cm x 60 cm	4 st/ tp 2 fp/levfp
	1824	Silver uten heftfilm på rull	20 cm x 60 cm	2 st/tp 1fp//levfp