

Dermacyn™ Wound Care

med Microcyn teknologi

“Tripple mode of action”

Dermacyn sårbehandling er en superoksidert løsning for bruk til rengjøring, skylling og fukting av akutte og kroniske sår, åpne sår, skrubb og brann sår. Ved å redusere mikrober og sørge for et fuktig miljø, tilrettelegges det for kroppens egen mulighet til å lege såret. Dermacyn passer perfekt i moderne sår behandling.

Brukerveiledning

Hvordan bruke Dermacyn:

Dermacyn Wound Care er klar til bruk. Det kreves ingen blanding eller fortykning. Bruk Dermacyn Wound Care direkte på det berørte området. Bruk Dermacyn Wound Care hver gang en sårbandasje skiftes.

- Gjennomfukt en kompress med Dermacyn og legg denne i såret ca. 15 minutter. Kan evt. gjennfukte kompressen dersom denne tørker ut.
- Fjern kompressen og fortsett sårbehandlingen i henhold til vanlig prosedyre.
- Dette kan gjenats 1-2 ganger pr. dag.

Håndtering:

Dermacyn Wound Care er biokompatibel for den angitte bruken. Løsningen irriterer ikke menneskelig hud, øyne eller svelg, og den er ikke allergifremkallende. Det kreves ingen spesielle forholdsregler ved håndtering.

Stabilitet:

Inntil flasken åpnes er Dermacyn Wound Care garantert stabil og steril frem til utløpsdatoen (datoen er angitt på flasken med år og måned). Når flasken åpnes, bør du notere deg datoen ifeltet "Date opened". Ubrukt løsning er garantert stabil i inntil 30 dager etter åpning av flasken.

Destruering:

Løsningen er ikke giftig og den er uskadelig for miljøet. Det kreves ingen spesielle hensyn ved destruering.

30 sekunders "in vitro killing time (%) reduksjon" etter bredspektrede gram-positive, gram-negative bakterier i en løsning.

• MRSA - Staphylococcus aureus	99.9999	VRE - Enterococcus faecalis	99.9999
• Staphylococcus aureus	99.9999	Escherichia coli	99.9997
• Acinetobacter baumannii	99.9999	Bacteroides fragilis	99.9999
• Candida albicans	99.9999	Enterobacter aerogene	99.9999
• Enterococcus faecium	99.9999	Haemophilus influenzae	99.9993
• Klebsiella oxytoca	99.9999	Klebsiella pneumoniae	99.9999
• Micrococcus luteus	99.9999	Proteus mirabilis	99.9999
• Pseudomonas aeruginosa	99.9998	Serratia marcescens	99.9999
• Staphylococcus epidermidis	99.9998	Staphylococcus haemolyticus	99.9999
• Staphylococcus hominis	99.9996	Staphylococcus saprophyticus	99.9999
• Streptococcus pyogenes	99.9999		

Dermacyn Wound Care inneholder:

- Oksidert vann (H₂O)
- Natriumhypokloritt (NaOCl)
- Hypoklorsyre (HOCl)
- Hydrogenperoksid (H₂O₂)
- Ozon (O₃)
- Klordioksid (ClO₂)
- Natriumhydroksid (NaOH)
- Natriumkarbonat (Na₂CO₃)
- Natriumklorid (NaCl)

- Tåler ikke frost - oppbevares i romtemperatur



PolyMed

For ytterligere informasjon:
PolyMed Scandic AS
Tomteveien 33 - 1618 Fredrikstad
Telefon: +47 46 81 51 17
Ordre : ordre@polymed.no
Hjemmeside: www.polymed.no