

Curea P1

Superabsorberade förband skyddar huden effektivt

Curea P1 och Curea P1 forte är effektiva problemlösare för måttligt till kraftigt vätskande sår. Patenterad SuperCore teknologi gör att den effektivt tar upp, binder stora mängder vätska och skapar en torr yta mot såret.



ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- Rengör såret enligt gällande principer.
- Lägg på en Curea P1 i passande storlek. (Går ej att klippa i förbandet)
- Lägg förbandet med filmsidan/trycka sidan ut från såret så att den vita sidan av förbandet kommer i kontakt med sårytan
- Vid djupare sår - fyll sårhålan med det material som används till kavitet enligt ordination och täck med Curea P1 som sekundärförband.
- Fixera förbandet
- Låt förbandet sitta på tills det är mättat. Max 7 dagar.

- Hög absorptionskapacitet
- Hög retention
- Spärrskikt hindrar läckage
- Förebygger maceration
- Torr yta mot sårområdet
- Reducerar lukt
- Reducerar risken för korskontamination
- Optimalt under kompression
- Innehåller ej lim eller bindemedel
- Ej allergiframkallande
- Kan användas 5-7 dagar på sårområdet
- Reducerar antalet förbandsbyten
- Steril

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Måttligt till kraftigt vätskande sår bla: trycksår, diabetessår, brännskador, venösa sår, nekrotiska sår och operationssår.

Curea P1 forte för extra absorptionskapacitet

PartnerMed

Partnermed AB
Box 25
452 21 Strömstad
www.partnermed.se
E-post info@polymed.no