

ApoWIPE - IV Port Disinfection

STERIL

Reduserer infeksjoner!

Til desinfeksjon av
injeksjonsporter, hetteglass og
forskjellige typer connectorer.

STERIL



Klutene er **individuet pakket** og størrelsen på pakken er designet slik for å minimere risikoen for kontaminering når kluten tas ut av pakken.



Størrelsen på kluten er tilpasset en hygienisk håndtering for å unngå berøring av det desinfiserte området.

Det grove materialet i kluten øker den mekaniske effekten.

Tykkelsen sikrer at kluten inneholder tilstrekkelig fuktighet og at Ethanol nivået er 80% gjennom hele prosedyren.

ApoWipe - IV Port inneholder 80% Ethanol og klutens materiale er av høy kvalitet. **Både kluten, ethanolen og pakken er sterilt behandlet.**

- **Færre infeksjoner**
- **Bedre økonomi**
- **Forbedret pasientsikkerhet**



ApoWIPE - IV port Disinfection



Innhold: Ethanol 80%, Vann 20%

Materiale: Microfiber

Holdbarhet: Uåpnet forpakning er holdbar 5år fra produksjonsdato.

Art.nr:	Produktbeskrivelse:	Størrelse:	Avd.fpk:	Trans.fpk:
21871	ApoWipe IV Port Disinfection	11x17cm	200stk	800stk

Prosedyre

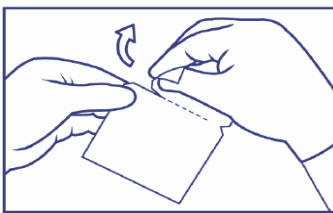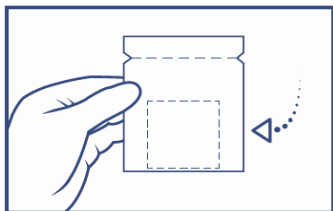

1. Kluten er plassert på bunnen av pakningen for å minimere risiko for kontaminering når man åpner pakken.
2. Åpne pakken i rivelinjen slik at kluten vil være uberørt.
3. Ta kluten ut av pakningen.
4. Desinfiser injeksjonsporten/connectoren / hetteglass ved å gni den nøye med kluten i 15 sekunder.
5. La injeksjonsporten /connectoren / hetteglasset tørke i 10 sekunder.