


SPYCRA[®] Protect

Spycra Protect er en bandasje der en glatt, pustende og Bi-elastisk bakside er kombinert med en myk silikon kleber.

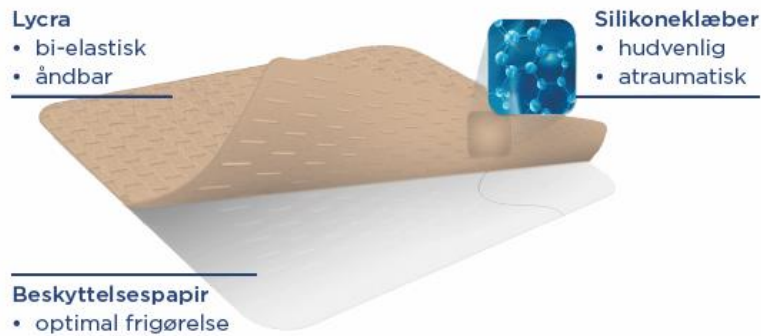

Bandasjen er tynn, myk og meget fleksibel og sitter på plass uten at kantene ruller seg sammen. Spycra Protect kan fjernes uten smerter samt settes på igjen.

På hel hud kan Spycra Protect anvendes i inntil 7 dager. På sår og blemmer skiftes bandasjen etter behov og etter huden og sårets tilstand.



Forebyggende

Beskyttelse av aldrende, tynn og skjør hud.

Beskyttelse av huden ved risiko for friksjon, f. eks. ved sengeleie og proteser. Samt ved Epidermolysis Bullosa.

Beskyttelse av hud over trykkutsatte områder, som knokkel fremspring, ved tuber og masker.

Beskyttelse av huden etter at såret er grodd, og ved arr behandling.

Forebygger sår rifter ved kløende og irritabel hud.

Som fikserings tape ved kanyler, infusjon etc. på spesielt sart og skjør hud.

Behandlende


Skin tears klasse 1 og 2a.

Overfladiske sår, med eller uten lett sekresjon.

Sår rifter

Over blemmer og små sår ved Epidermolysis Bullosa

Kontraindikasjoner: Ved infeksjon i sår og/eller hud.

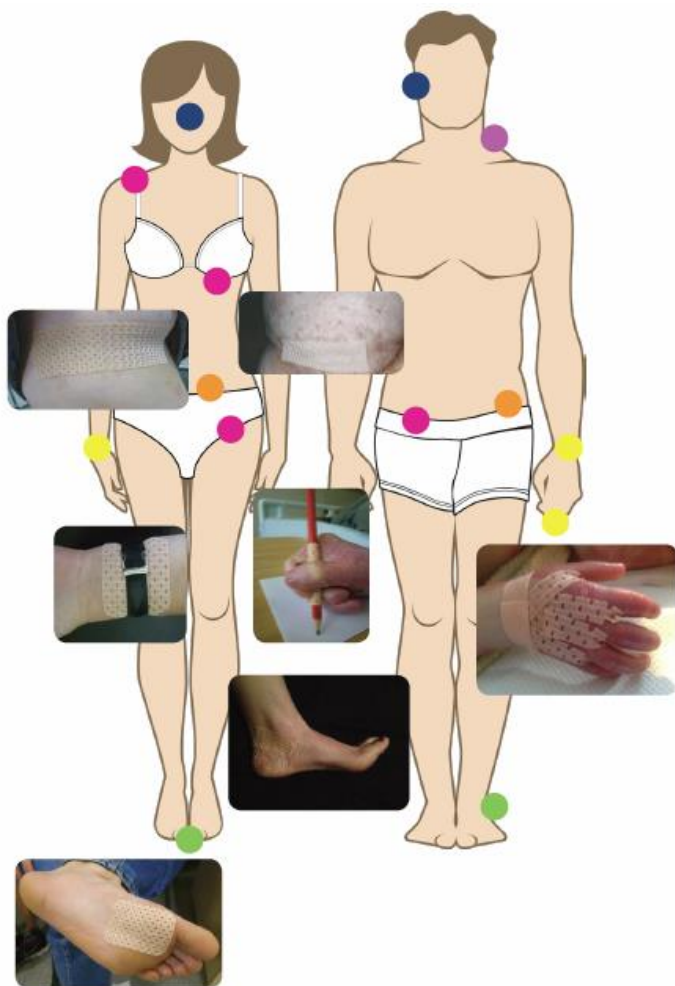

Bandasjen kan strekkes i to retninger, noe som bidrar til at friksjon som skyldes bevegelse blir avverget av bandasjen. Dette beskytter huden mot skjære-kreftene som kan forårsake blemmer og sår.

Spycra Protect er velegnet over led og på områder som er vanskelig å bandasjere, som f.eks. armhuler, under bryst, i lysken etc.



Spycra Protect, steril

Vare nr.	Størrelse	Antal/æske
SDSC-575	5 x 7,5 cm	10 stk
SDSC-7510	7,5 x 10 cm	10 stk
SDSC-1018	10 x 18 cm	5 stk
SDSC-1830	18 x 30 cm	3 stk
SDSC-5150	5 x 150 cm	1 stk

Steril, enkeltpakket. Medisinsk utstyr, klasse 2b.
Oppbevares tørt og utenfor direkte sollys.
Holdbarhet 5 år etter produksjonsdato.

Bestillingsinformasjon:

PartnerMed As, Tomteveien 33, 1618 FREDRIKSTAD
E-mail: info@partnermed.no, mobil: 94000747 / 46815117